

AIR LIQUIDE Santé FRANCE

TOUR ARIANE  
5, PLACE DE LA PYRAMIDE  
PARIS - LA DEFENSE 9  
92800 PUTEAUX  
Tél. : (33)-(0)1.44.11.00.00  
Fax : (33)-(0)1.44.11.00.90  
www.airliquidesante.fr

Paris, le 21 novembre 2008

**Objet** : Information de sécurité de l'AFSSaPS DM-RECO 08/06 concernant les insufflateurs manuels réutilisables avec membrane dite "bec de canard".

Madame, Monsieur,

Suite à la note d'information de sécurité publiée le 19 novembre 2008 par l'AFSSaPS concernant les insufflateurs manuels réutilisables équipés de membranes dites "bec de canard", et en tant que distributeur de tels dispositifs, nous souhaitons vous apporter les informations suivantes :

1. Dans l'attente de trouver une solution pleinement satisfaisante permettant de garantir un remontage correct de ce type d'insufflateurs, et par principe de précaution, nous suspendons momentanément la vente de nos références concernées : 35396, 35397, 35400, 62608, 62609, 64094, 90343, 90344, 90881 et 90937.



Modèles Réutilisable

2. Sachant que vous êtes utilisateur de ces produits, nous vous invitons à relire les préconisations de la notice du fabricant pour le remontage disponible sur notre site Internet [www.airliquidesante.fr](http://www.airliquidesante.fr) rubrique Sécurité, et de vous assurer "qu'1 seule" membrane « bec de canard » est présente dans la valve patient après remontage. Une autre précaution à prendre est de nettoyer chaque membrane "bec de canard" isolément.

3. Une gamme complète d'insufflateurs manuels avec membrane "bec de canard" à usage unique qui, par définition, élimine tout risque d'un mauvais remontage, est disponible sur demande.



Modèles à Usage Unique

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.



Jean-Pierre Renard  
Directeur Sécurité Qualité et Maîtrise des Risques

PJ : Message d'alerte de l'AFSSaPS DM-RECO 06/08